


التحضير لاستخدام المنتج




مكونات المنتج

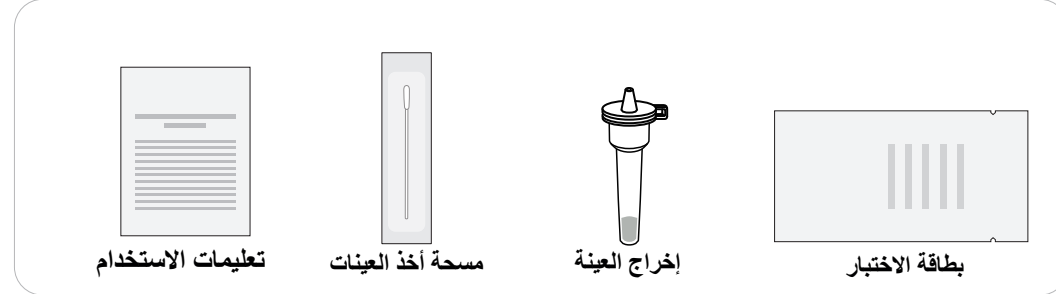

إجراءات الاختبار

1. اكشط لفتح عبوة مسحة أخذ العينات. لا تلمس طرف المسحة.
2. بلطف في كل من تجاويف الأنف لمدة 20 ثانية، ثم تدوير 5 لفات cmتضاف مسحة تلميح 2.5. بالنسبة للأطفال، أقصى عمق قد يكون أقل من 2.5 سم و يجب تعديلها بشكل صحيح من قبل موظفي أخذ العينات.
3. ضع المسحة في أنبوب استخراج العينة ولف المسحة في المحلول لخمس مرات على الأقل.
4. اضغط على الأنبوب بإصبعك. حرك المسحة لأعلى وأسفل لثلاث مرات على الأقل للتخلص من أي عينة محلول من المسحة. من ثم قم بإخراج المسحة.
5. أغلق أنبوب استخراج العينة بالغطاء بإحكام. اضغط برفق على الأنبوب 3 مرات لخلط محلول العينة. ضع الأنبوب ثابتاً لمدة دقيقة واحدة.
6. امسك رأس الأنبوب باتجاه الأسفل. من ثم اضغط لإضافة 3 قطر ات من محلول العينة في على بطاقة الاختبار. "s" بؤرة تحميل النتيجة.
7. اقرأ أعلى نتيجة الاختبار بعد مرور 15 دقيقة. تعتبر النتيجة غير صالحة وغير دقيقة بعد مرور 30 دقيقة. لا تقم بإعادة تحميل عينة المحلول على بطاقة الاختبار المستعملة.
8. ضع أدوات المنتج المستعملة في كيس بلاستيكي. أغلق الكيس وضعه في كيس بلاستيكي آخر وتخلص من الكيس مع القمامة المنزلية.

تفسير النتائج

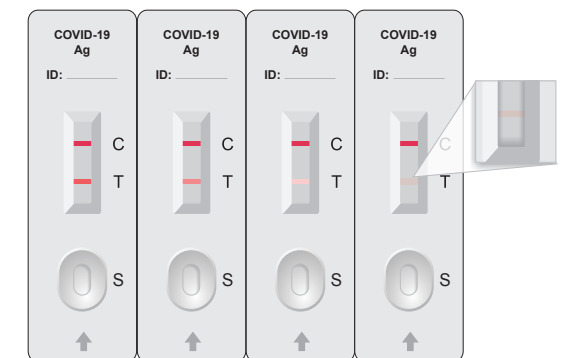


ي باجي!

تظهر أشرطة حمراء على كلا الخطين و في خلال 15 - 30 دقيقة. يعتبر ظهور أي ظل رمادي على خط أن النتيجة إيجابية.



ي بلس:

دون طيرش ل اذه رهظي الو C طخل ا دن ع رمح أ طيرش رهظي ا. دن ع ل ا عض و دع ب ق ي ق د 30 - 15 ل ل ا خ طخل ا

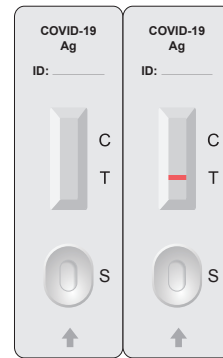

ل طاب:

نأ ين ع ي اذه ف، C طخل ا دن ع رمح أ طيرش رهظي مل اذ ا نكلو و رخ أ قرم رابت خال ا دع ا. دس ا ف رابت خال ا ة ج ي تن ا. رخ أ رابت خال ا قق ا طب م ا د خ ت س ا ب