

KURZANLEITUNG FÜR DEN SELBSTTEST

CE 1434 COVID-19 Antigen-Nachweis-Kit – Nasenabstrich

VORBEREITUNG VOR DEM TEST



Schnäuzen Sie die Nase, um die Nasenhöhlen zu reinigen.



Waschen Sie die Hände und halten Sie sie trocken.



Verwenden Sie Ihr Telefon oder Ihre Uhr als Timer.

PRODUKTKOMPONENTEN



Testkassette



Probenentnahmeröhrchen & Röhrchenkappe




Probenahme-Tupfer



Gebrauchsanweisung


PROBENNAHME

1 Öffnen Sie die Verpackung des Probenahme-Tupfers. Berühren Sie NICHT die Tupferspitze.

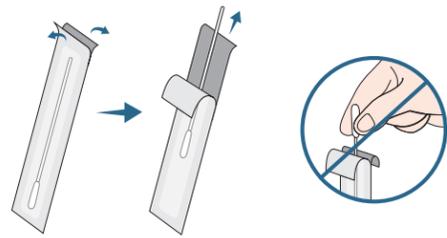


2 Führen Sie die Tupferspitze 2,5 cm vorsichtig für jeweils 20-Sekunden in beiden Nasenhöhlen nacheinander ein und drehen Sie fünf Runden.


Bei Kindern kann die maximale Tiefe kleiner als 2,5 cm sein und sollte von der Person, die die Probe nimmt, sorgfältig und angemessen angepasst werden.

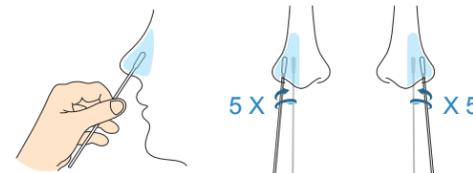


3 Legen Sie den Tupfer in das Probenextraktionsröhrchen. Rühren Sie den Tupfer in der Lösung mindestens 5 Mal um.

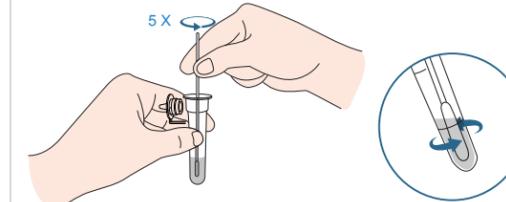


4 Drücken Sie das Röhrchen mit den Fingern zusammen. Schütteln Sie den Tupfer mindestens 3 Mal auf und ab, um die Probenlösung aus dem Tupfer zu entfernen. Entnehmen Sie den Tupfer.

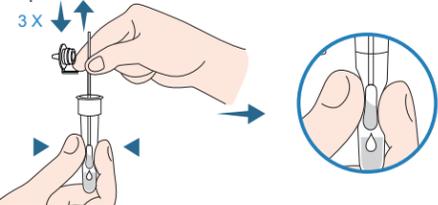


5 Setzen Sie die Röhrchenkappe fest auf das Probenentnahmeröhrchen. Drücken Sie das Röhrchen 3 Mal sanft zusammen, um die Probenlösung zu mischen. Stellen Sie das Röhrchen für 1 Minute ruhig.

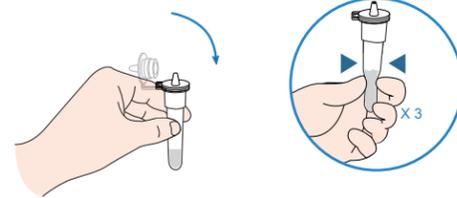


6 Halten Sie das Röhrchen umgedreht. Drücken Sie, um 3 Tropfen der Probenlösung in die Beladungsvertiefung "S" auf der Testkarte zu geben.

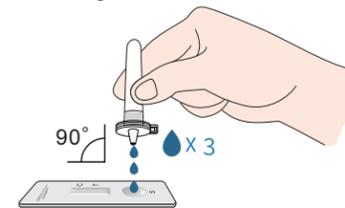


7 Lesen Sie das Ergebnis nach 15 Minuten ab. Nach 30 Minuten wird das Ergebnis als ungenau und ungültig angesehen. Laden Sie die Probenlösung NICHT erneut auf eine gebrauchte Testkarte.

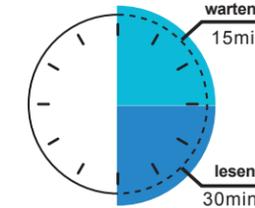

8 Entsorgen Sie die verwendeten Testkomponenten in einem verschlossenen Beutel im Hausmüll unter Beachtung der örtlichen Vorschriften.

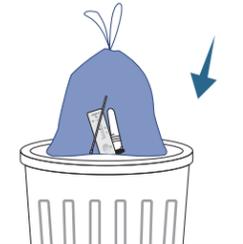

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

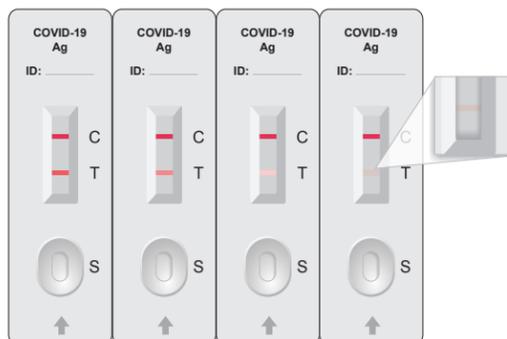


Positiv:

Rote Banden erscheinen sowohl an der T- als auch an der C-Linie in 15 bis 30 Minuten. Jede sichtbare Schattierung an der T-Linie sollte als positiv betrachtet werden.



Negativ:

Eine rote Bande erscheint an der C-Linie, während an der T-Linie 15 bis 30 Minuten nach dem Laden der Probe keine rote Bande erscheint.

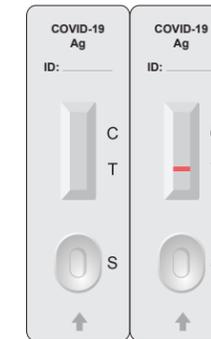

Ungültig:

Wenn an der C-Linie kein roter Streifen erscheint, ist das Testergebnis ungültig. Wiederholen Sie den Test mit einer anderen Testkarte.