

# Guía rápida para el autoexamen

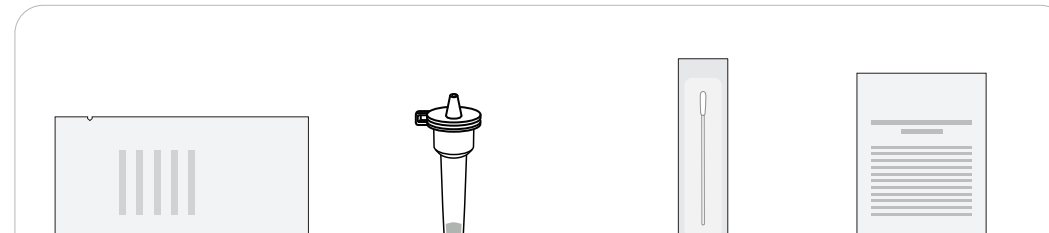
CE 1434 Kit de Detección de Antígenos de COVID-19 - Hisopo nasal

## PREPARACIÓN ANTES DE LA PRUEBA



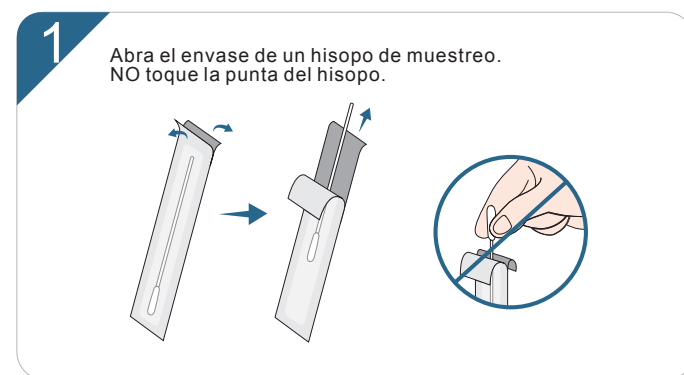
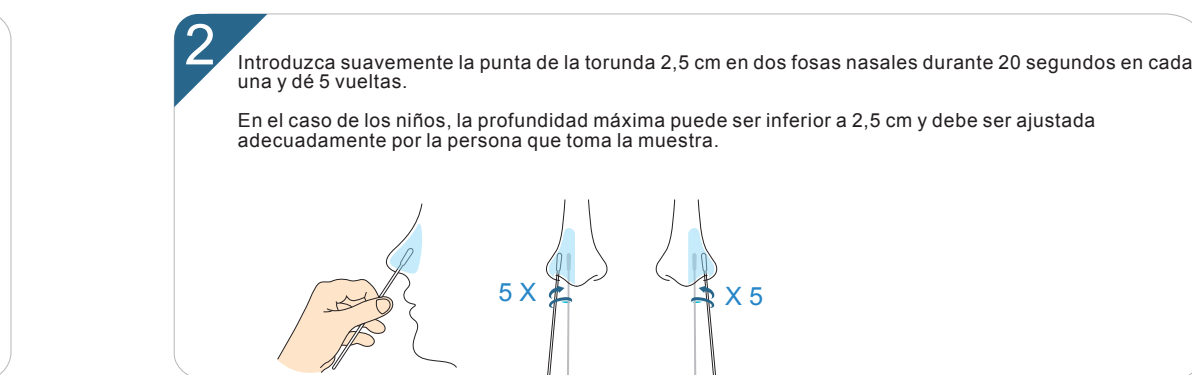
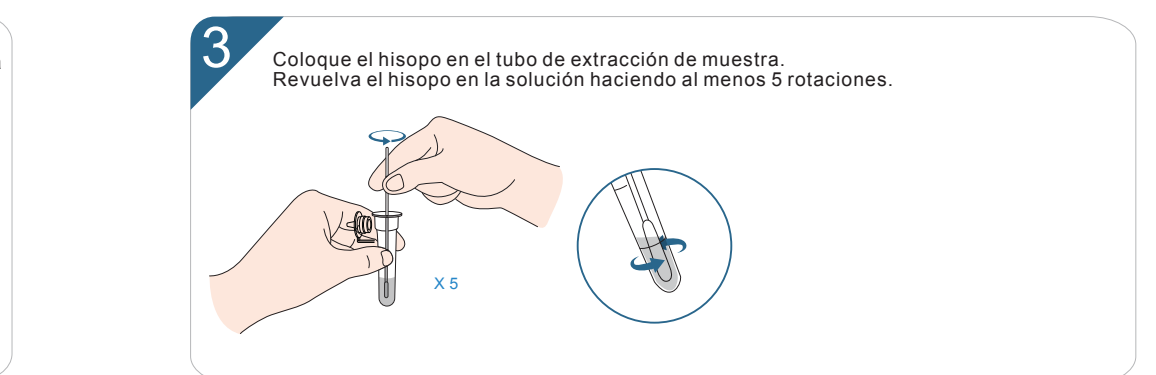

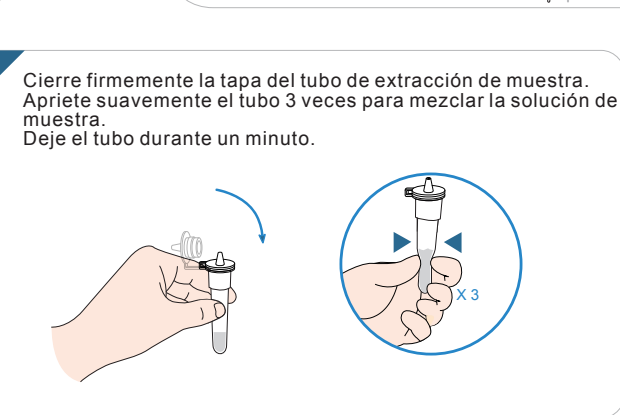
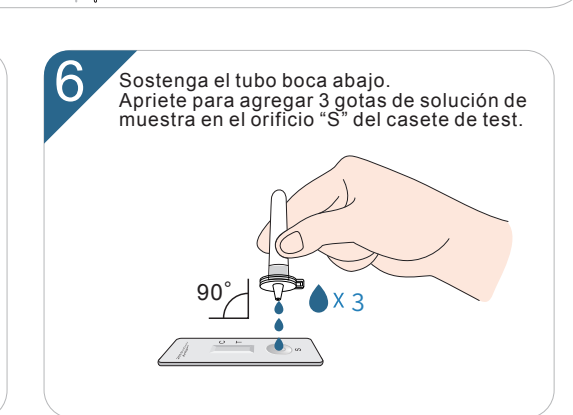
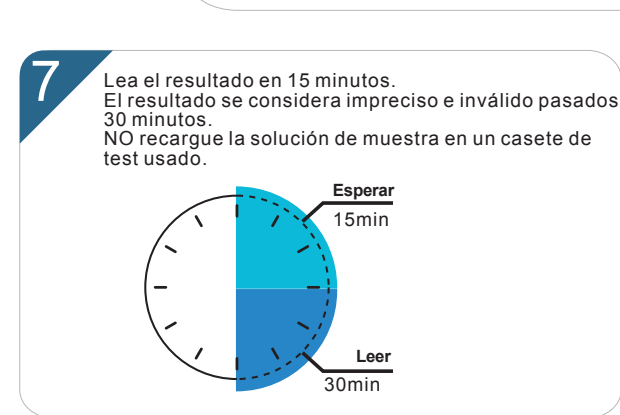
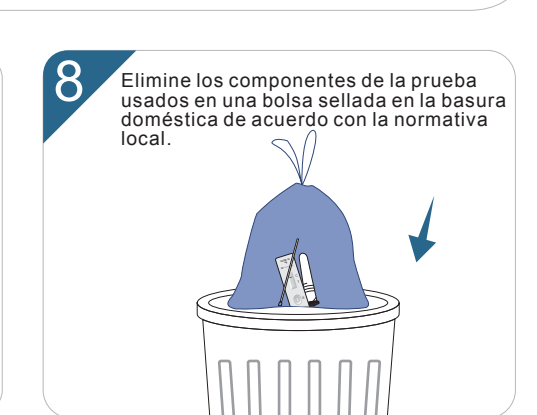
Suéñese la nariz para limpiar las fosas nasales. Lávese las manos y manténgalas secas. Utilice su móvil o reloj como temporizador.

## COMPOSICIÓN

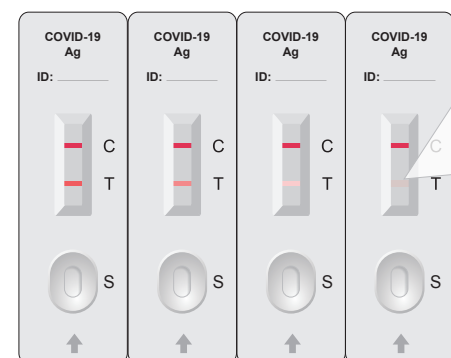


Casete de test  
Tubo de extracción de muestra & Tapón de tubo  
Hisopo de muestra  
Manual de instrucciones

## PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

- 1** Abra el envase de un hisopo de muestreo. NO toque la punta del hisopo.  

- 2** Introduzca suavemente la punta de la torunda 2,5 cm en dos fosas nasales durante 20 segundos en cada una y dé 5 vueltas.  
En el caso de los niños, la profundidad máxima puede ser inferior a 2,5 cm y debe ser ajustada adecuadamente por la persona que toma la muestra.  

- 3** Coloque el hisopo en el tubo de extracción de muestra. Revuelva el hisopo en la solución haciendo al menos 5 rotaciones.  

- 4** Apriete el tubo con los dedos. Mueva el hisopo hacia arriba y hacia abajo al menos 3 veces para expulsar del hisopo toda la solución de muestra. Saque el hisopo.  

- 5** Cierre firmemente la tapa del tubo de extracción de muestra. Apriete suavemente el tubo 3 veces para mezclar la solución de muestra. Deje el tubo durante un minuto.  

- 6** Sostenga el tubo boca abajo. Apriete para agregar 3 gotas de solución de muestra en el orificio "S" del casete de test.  

- 7** Lea el resultado en 15 minutos. El resultado se considera impreciso e inválido pasados 30 minutos. NO recargue la solución de muestra en un casete de test usado.  

- 8** Elimine los componentes de la prueba usados en una bolsa sellada en la basura doméstica de acuerdo con la normativa local.  


## INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS



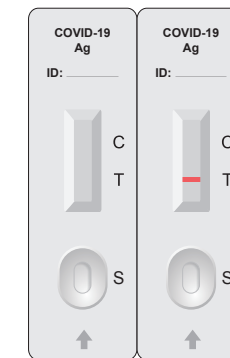
### Positivo:

ambas líneas rojas T y C aparecen en 15 a 30 minutos. Cualquier matiz de sombra visible en la línea T debe considerarse positivo.



### Negativo:

la línea roja C aparece, mientras que ninguna línea T aparece dentro de los 15 a 30 minutos posteriores a la carga de la muestra.



### No válido:

mientras la línea roja C no aparezca, indica que el resultado de la prueba no es válido y debe volver a realizarse con otro casete de test.